

neodisher® LM 2

Sıvı, hafif alkalin temizlik solüsyonu

Daldırma ve ultrasonik banyolarda, ayrıca pipet yıkayıcılarda kullanmak için



Temel uygulama alanları :

- Hastanelerde, diş hekimliğinde, medikal, endüstriyel ve biyoloji laboratuvarlarındaki laboratuvar cam ürünlerinin ve cerrahi aletlerin daldırma ve ultrasonik banyolarda manuel temizliği
- Deney hayvanlarının kapları ve kafeslerinin manuel temizliği
- Özel yıkama makinelerinde pipetlerin temizliği

Özellikler :

neodisher® LM 2 Düşük köpüklü sürfaktanlar ve çeşitli temizlik arttırıcıları içerir.
neodisher® LM 2 Solüsyon kolaylıkla durulanır ve köpüksüzdür. Bu düşük köpüklü formülasyonu sayesinde temizlenecek parçalar önceden durulanmadan makinede yıkanabilir.

neodisher® LM 2 Organik kalıntıları giderir, örn. kabuklu kan ve protein kalıntılarının yanı sıra deneysel hayvan kafeslerinden gelen dışkılar ve inorganik kalıntılar

neodisher® LM 2 Dental ve cerrahi aletlerin, özellikle mikro aletlerin ultrasonik banyolarda mükemmel temizliğini sağlar. Laboratuvar cam ürünleri makineyle temizlenmeden önce otoklavlanırsa, neodisher® LM 2 (30ml/Lt) ilavesiyle ıslak otoklavlama önerilir

Daha sonra makine temizliğinde kir artıkları daha kolay temizlenebilir.

Cam, seramik, paslanmaz çelik ve plastik gibi standart laboratuvar gereçleri malzemelerinin hiçbiri, neodisher® LM2 çözümünden zarar görmez. Hafif metalden üretilmiş ürünler önceden test edilmelidir.

Her su sertliğinde kullanılabilir.

Uygulama ve dozaj:

Laboratuvar cam ürünlerinin ve cerrahi aletlerin manuel temizliği :
5-20ml/l daldırma ve ultrasonik banyolarda
10 - 30 ml/l pipet yıkayıcılarda
Uygulama süresi: 10 - 30 dk.

neodisher LM 2 solüsyon suyla tamamen durulanmalıdır (tercihen deiyonize su ile)

Başka ürünlerin konsantreleri ile karıştırmayın.

Sadece profesyonel kullanım için!

Teknik veriler:

Yoğunluk (20°C): 1,2 g/cm³
pH aralığı (deiyonize suda, 20°C) 5 - 30 ml/l : 10,6 - 11,3
Viskozite (konsantre, 20°C): < 10 mPas

İçeriği:

İçeriği, deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre:

% < 5 amfoterik sürfaktanlar, anyonik sürfaktanlar

% 15 - 30 fosfat

CE işareti:

neodisher® LM 2 tıbbi cihazlar için Avrupa mevzuatı 93/42/EC gerekliliklerine uygundur.

Depolama bilgisi:

Tavsiye edildiği şekilde saklandığında 3 yıl kullanılabilir.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neodisher® LM 2

Sıvı, hafif alkalin temizlik solüsyonu

Daldırma ve ultrasonik banyolarda, ayrıca pipet yıkayıcılarda kullanmak için



Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Güvenlik bilgileri için EC güvenlik veri formuna bakın. Bu form www.drweigert.com adresindeki "Service" bölümündedir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

GB 4403/2-3
08/14



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.