




neodisher® MediDry special



Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin makinalarda temizliğinde durulama desteği

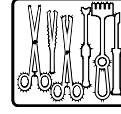

Konsantre sıvı

Uygulama alanları:

Cerrahi aletler, oftalmolojik aletler, laparoskopik aletler, anestezi ekipmanları, konteynirler, implantlar ve biberonların makinalarda temizliğinde durulama

Performans:

- Plastik materyallerin kurutulmasını destekler
- Laringeal maskeler, adaptörler ve konteynir kapakları gibi polisülfon (PSU) ve polifenilsülfon'dan (PPSU) üretilmiş anestezi gereçlerinin aksesuarları için uygundur.
- neodisher MediDry special amaçlandığı şekilde kullanıldığında, tıbbi cihazların biyoyoumluluğu etkilenmez. (Tıbbi biyolojik değerlendirme EN ISO 10993-1'e göre cihazlar)

Özgün özellikler:

- Sümfaktanlar içermez
- Asidik, alkalın artıkları nötrale eder
- Son durulamada yumuşatılmış su kullanımı lekeleri azaltır
- Mükemmel materyal uyumluluğu; sterilizasyon sırasında plastik materyallerdeki gerilim çatlaklarını önler

Uygulama ve dozaj:

neodisher MediDry special makinalarda son durulamada kullanılır. Dozlama su kalitesine ve yıkanan ürünlerin materyallerine bağlı olarak 0,3-1ml/lt arasındadır.

Uygun dozlama cihazını kullanın.

Notlar:

- Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.

- Ürün değişiminden önce emme hortumu dahil dozlama sistemini su ile durulayın.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.
- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyararak yeniden işlemeye dikkat edin.
- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

Teknik veriler:

pH-aralığı	3,8 - 3,5 (0,3 - 1 ml/lt, deiyonize suda, 20°C)
Yoğunluk	yaklaşık 1,04 gr/cm ³ (20°C)
Viskozite	< 10 mPa s (konsantre, 20°C)

İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:
% < 5 polikarboksilatlar
koruyucular:
(metilklorozotiazolinon/metilizotiazolinon)

CE-işareti

neodisher MediDry special medikal ürünlerle ilgili Avrupa direktifine uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

Depolama bilgisi:

Daima 0°C - 30°C aralığında depolayın.

Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 3 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.



neodisher® MediDry special

Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Bu form www.drweigert.com adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın.

Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

MB 4571/3-1 Revizyon tarihi: 06/2020



Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.