





# neodisher® MediZym

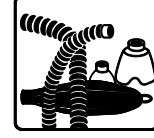

Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin temizliği için pH-nötr deterjan

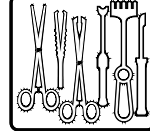

Konsantre sıvı

## Uygulama alanları:

- Cerrahi aletlerin, anestezi ekipmanlarının, esnek endoskoplardan, konteynirlerin ve diğer medikal ekipmanların otomatik makinalarda temizliği

## Performans:

- Kurumuş ve denatüre kan artıklarını giderir
- Paslanmaz çelik, alet çeliği, hafif metaller, cam, standart plastikler, anestezi ekipmanlarının materyalleri ve esnek endoskoplardan neodisher MediZym ile uyumludur.

## Özgün özellikler:

- Yüksek derecede malzeme koruması
- pH nötr bazlı enzimler ve diğer temizlik katkıları

## Uygulama ve dozaj:

neodisher MediZym otomatik makinalarda, daldırma ve ultrasonik banyolarda kullanılabilir. Dozaj miktarı temizlenecek aletlere ve kontaminasyon derecesine göre ayarlanmalıdır. neodisher MediZym kullanırken aşağıdaki parametreler tavsiye edilir:

Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin otomatik makinalarda temizliği	2 - 10 ml/lt (% 0,2 - 1,0), 40 - 50°C, 5 - 10 dk
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Esnek endoskoplardan otomatik makinalarda temizliği	5 ml/lt (% 0,5 ), 5 - 10 dk
Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin daldırma banyolarda manuel temizliği	5 - 20 ml/lt (% 0,5 - 2,0 ), maks. 45°C, 20 - 30 dk
Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin ultrasonik banyolarda manuel temizliği	5 - 20 ml/lt (% 0,5 - 2 ), maks. 45°C, 5 - 10 dk

neodisher MediZym solüsyon günlük olarak ama görsel olarak kirliyse hemen değiştirilmelidir.

neodisher MediZym solüsyon tercihen deiyonize su ile komple durulanmalıdır. Su lekelerini önlemek için son durulamada demineralize su kullanılması tavsiye edilir.

## Uygulama alanları:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Başka ürünlerle karıştırmayınız
- Ürün değişiminde emme hortumu dahil dozlama sistemini durulayın.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.
- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyarak yeniden işlemeye dikkat edin.



# neodisher® MediZym

- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

MB 4040/3-3  
Yayın tarihi: 05/2021

## Teknik veriler

pH aralığı	7,9 (2 - 20 ml/lt, deiyonize suda, 20 °C)
Yoğunluk	yaklaşık 1,0 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Viskozite	< 10 mPas (konsantre 20°C)

## İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:

%< 5 anyonik sürfaktanlar, enzimler, koruyucular (2-phenoxy-ethano)

CE-işareti:

neodisher MediZym tıbbi cihazlar için Avrupa standartlarına uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

## Depolama bilgisi:

Serin fakat donmayacak şekilde depolayın. Daima 0°C - 25°C aralığında depolayın. Güneş ışığından koruyun. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 2 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.

## Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Bu form [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir. Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.