



# neodisher® SBN plus



## Sürgü yıkama makinaları için özel durulama desteği



### Konsantre sıvı

#### Uygulama alanları:

- Buhar dezenfeksiyonlu sürgü ve idrar kapları yıkama makinaları için su sertliği giderme ve durulama desteği

#### Performans:

- Yüksek su sertliğinde bile buhar jeneratörlerinde, borularda ve püskürtme başlıklarında kireç tortularını önler.
- Özel bileşenleri sayesinde etkili bir şekilde su sertliğini giderir
- Düşük köpüklü formüllü sürfaktanları sayesinde optimize edilmiş, hızlı, kireç tortusuz ve lekesiz kurutma

#### Özgün özellikler:

- Temiz ve hoş kokusu sayesinde kötü kokuları giderir
- Her su sertliğinde kullanılabilir
- Asidik; organik asitler esaslı

#### Uygulama ve dozaj:

neodisher SBN plus buhar dezenfeksiyonlu sürgü yıkama makinalarında kullanılır. neodisher SBN plus yıkama makinalarındaki dozlama sistemi ile dozlanır. Doz su sertliğine bağlı olarak 0,5 - 1,5 ml/lt arasındadır. Dozlama sistemi ve buhar jeneratörleri aside dayanıklı olmalıdır.

İnatçı kirleri gidermek için sürgü ve idrar kapları için üretilmiş özel bir deterjan olan neodisher SBR extra kullanımını tavsiye ederiz.

#### Notlar:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Ürün değişiminde emme hortumu dahil dozlama sistemini suyla durulayın.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.

- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyararak yeniden işlemeye dikkat edin.
- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.

#### Teknik veriler:

pH-aralığı	3,5 - 3,1 (0,5 - 1,5 ml/lt, deiyonize suda, 20°C)
Viskozite	< 50 mPa s (konsantre, 20°C)
Yoğunluk	yaklaşık 1,1 g/cm <sup>3</sup> (20°C)

#### İçeriği:

% 5 - 15 iyonik olmayan

sürfaktanlar

% < 5 polikarboksilat

koruyucular (metilklorozotiazolinon/metilizotiazolinon),

parfüm

CE-işareti:

neodisher SBN plus medikal ürünlerle ilgili Avrupa direktifine uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

#### Depolama bilgisi:

Daima 0°C - 30°C aralığında depolayın.

Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 3 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.



# neodisher® SBN plus

## Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın. Bu form [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir. Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.  
MB 4792/3-2 Yayın tarihi: 03/2020



Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.