



neodisher® SBX



Sürgülerin otomatik temizliği için kompleks yapıcı



Konsantre sıvı

Uygulama alanları:

- Otomatik makinalarda sürgü ve idrar kaplarındaki kireç oluşumunu önlemek için su sertliğini kompleksler

Performans:

- Buhar jeneratörlerinde, borularda ve püskürtme uçlarında kireç artıklarını önler

Özgün özellikler:

- Su sertliğinin sekestrasyonu için
- Her su sertliğine uygun
- Düşük alkali formülasyonu

Uygulama ve dozaj:

neodisher SBX buhar dezenfeksiyonlu sürgü yıkama makinalarında kullanılır. neodisher SBX sürgü yıkama makinalarındaki dozlama sistemi ile dozlanır. Doz, su sertliğine bağlı olarak 1–3 ml/lt arasındadır.

neodisher SBX sürgü yıkama makinalarında buhar üretimi için kullanılan suya direkt veya alternatif olarak su rezervuarına dozlanabilir.

Sürgü ve idrar kaplarındaki inatçı kirleri çıkartmak için ek olarak neodisher SBR extra'yı tavsiye ederiz.

Notlar:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Ürün değişiminde emme hortumu dahil dozlama sistemini su ile durulayın.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.

- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyararak yeniden işlemeye dikkat edin.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.
- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

Teknik veriler:

pH-aralığı	10,0 – 10,2 (1 - 3 ml/lt, deiyonize suda, 20°C)
Viskozite	< 50 mPa s (konsantre, 20°C)
Yoğunluk	yaklaşık 1,2 g/cm ³ (20 °C)

İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:
%15 - 30 polikarboksilatlar

CE-işareti:

neodisher SBX tıbbi cihazlar için Avrupa standartlarına uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

Depolama bilgisi:

Serin fakat donmayacak şekilde depolayın. Daima 0°C - 30°C aralığında depolayın. Güneş ışığından koruyun. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 3 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.



neodisher® SBX

Tehlike ve ihtiyati durumlar:

neodisher SBX (CLP-Düzenleme EC) No 1272/2008'e göre tehlikeli değildir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın. Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Bu form www.drweigert.com adresindeki

"Service/Downloads" bölümündedir.

MB 4015/3-3 Yayın tarihi: 09/2020

Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.